


Ivoclean

Parfaire le nettoyage après l'essayage

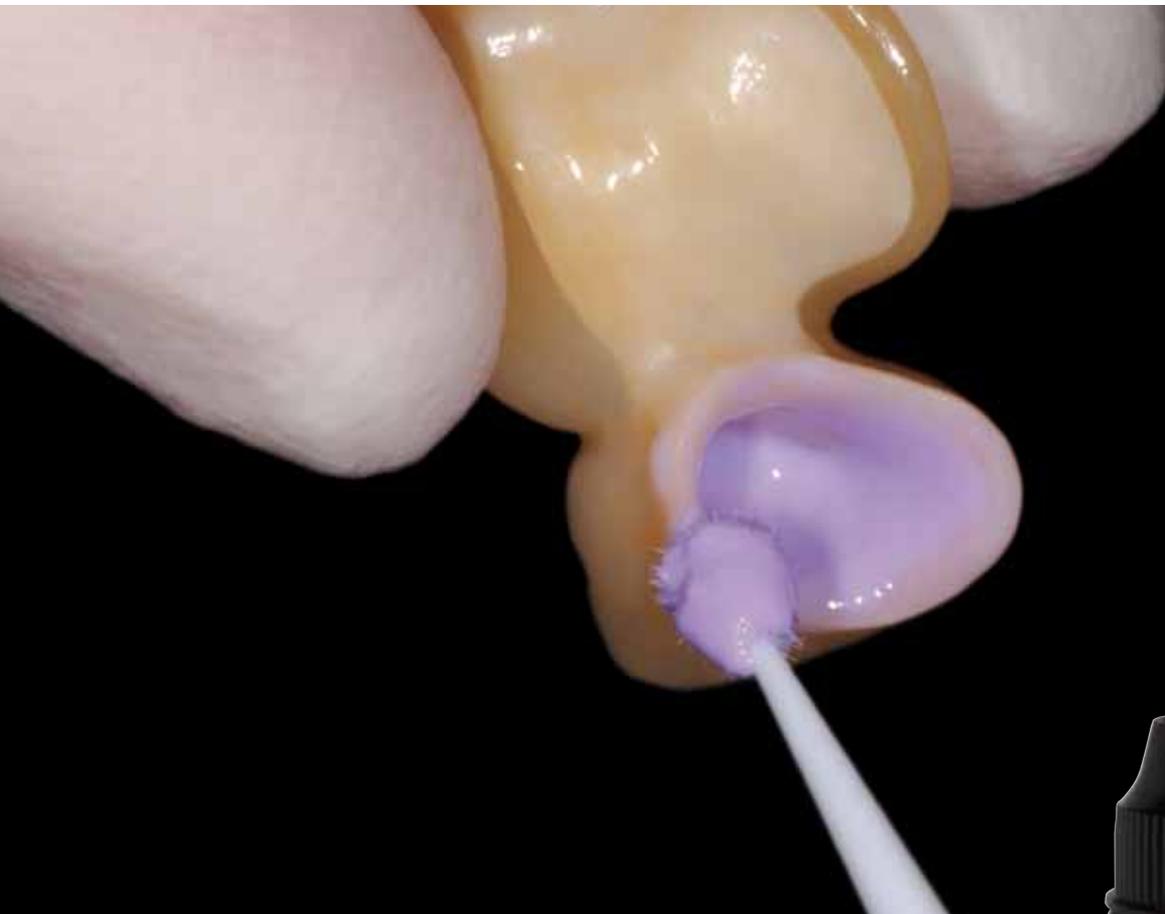


| Efficace | Universel | Pratique

Ivoclean

La pâte de nettoyage universelle Ivoclean nettoie les intrados des restaurations prothétiques après l'essayage en bouche, créant ainsi les conditions optimales pour le collage.

Lors de l'essayage en bouche, la contamination par la salive des surfaces de la restauration ne peut être évitée. Cela peut être problématique si les restaurations doivent ensuite être collées.

Le nettoyage à l'acide phosphorique n'est indiqué que pour les restaurations en vitro-céramique et en composite. En effet, l'acide phosphorique bloque l'action chimique du conditionneur d'intrados appliqué sur les restaurations en zircone et les alliages non précieux. Il ne peut donc être utilisé pour le nettoyage de ce type de restaurations.

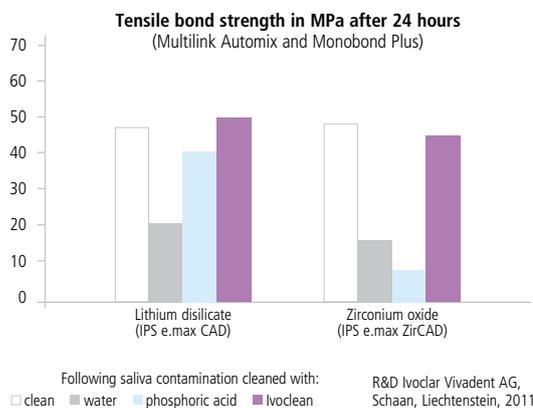

EFFICACE

Ivoclean permet de nettoyer efficacement les surfaces des restaurations contaminées par la salive, afin de garantir une adhésion forte et durable entre le matériau de collage et la restauration.

UNIVERSEL

Ivoclean agit sur tous les matériaux de restauration dentaire :

- Vitrocéramique
- Zircone
- Alumine
- Alliages précieux et non précieux
- Composite de laboratoire

PRATIQUE

Appliquer simplement la pâte sur la surface de la restauration, laisser agir 20 secondes, et rincer soigneusement à l'eau. Sécher ensuite à l'air exempt d'huile.



Essayage



Appliquer Ivoclean et laisser agir 20 secondes



Rincer



Sécher

Présentation :

Refill 637568AN

1 flacon Ivoclean, 5g



Ces produits font partie de notre gamme de compétences „All Ceramics” et „Implant Esthetics”. Tous les produits de cette gamme sont parfaitement adaptés les uns aux autres.