


# Plaque Test

Révéléteur de plaque dentaire fluorescent

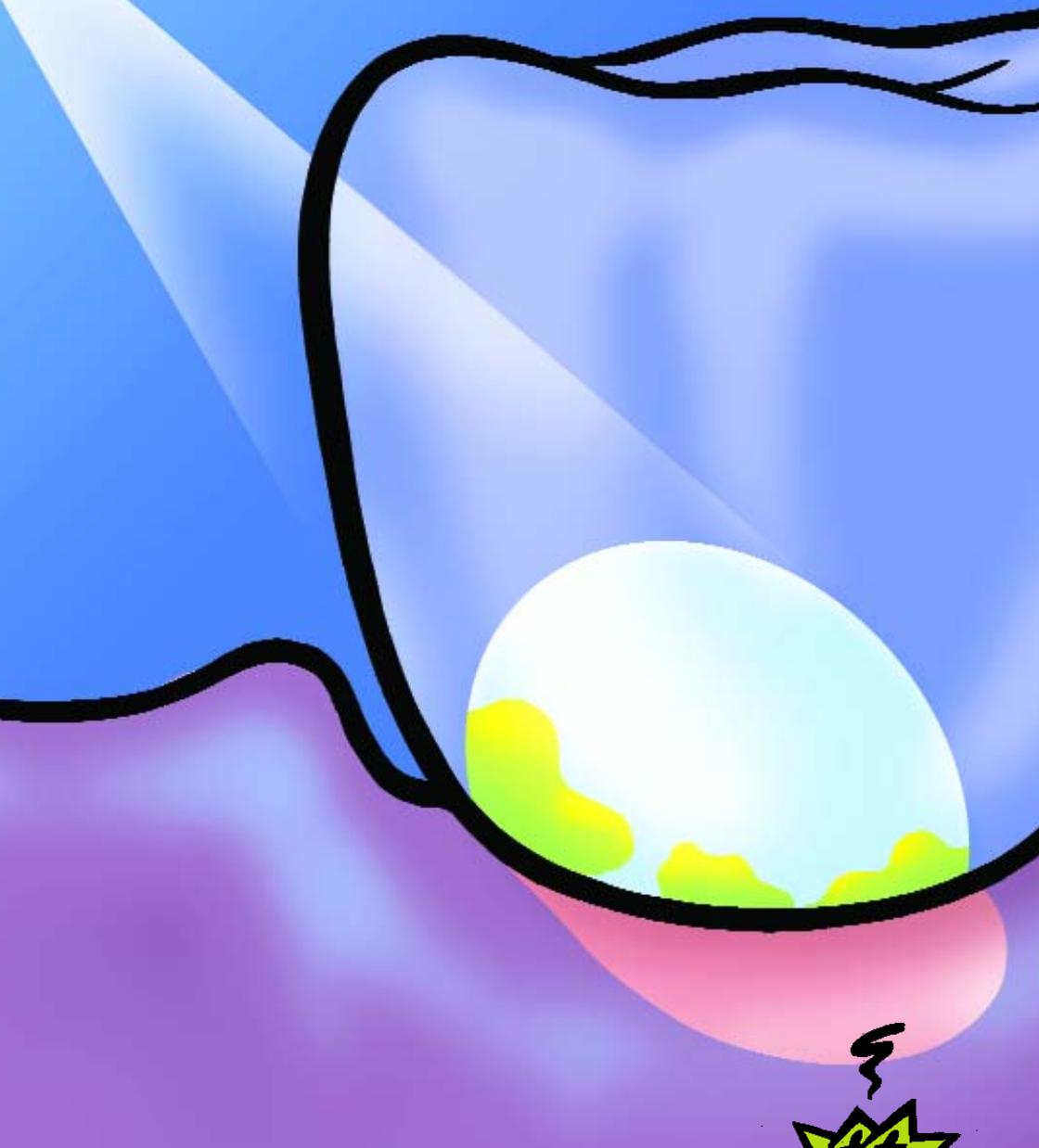

Rend la plaque dentaire visible

ivoclar  
vivadent®  
clinical

# Plaque Test

La solution idéale pour rendre la plaque dentaire visible

## Visible

avec une lampe  
à photopolymériser



## Invisible

Sans lampe  
à photopolymériser



La plaque bactérienne favorise le développement des caries, mais aussi des maladies parodontales, qui mettent en danger la santé des dents et des gencives.

## Illumination de la plaque

- Appliquer Plaque Test généreusement sur les surfaces dentaires
- Demander au patient de se rincer la bouche
- Eclairer les dents à l'aide d'une lampe à photopolymériser. Toutes les zones affectées par la plaque apparaissent fluorescentes.

- Retirer soigneusement la plaque rendue visible à l'aide d'un brossage ou d'un nettoyage professionnel.

## Avantages:

- agit avec tout type de lampe à photopolymériser
- pas de coloration de la langue ou des muqueuses
- simplicité de mise en oeuvre
- application ciblée
- utilisation économique

## Une solution convaincante!

Plaque Test est un moyen rapide, facile et esthétique de :

### Convaincre

vos patients de la nécessité d'améliorer leur hygiène orale

### Apprendre

à vos patients où et comment appliquer ces mesures d'hygiène

### Protéger

vos patients des maladies dentaires et parodontales

## Présentation

1 Bouteille  
Plaque Test, 10 ml  
Accessoires



Ce matériau a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformément au mode d'emploi. Les illustrations et explications sont données à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.  
Imprimé au Liechtenstein © Ivoclar Vivadent AG, Schaan  
??????05041/BVD

Ivoclar Vivadent SAS  
BP 118  
710 Saint-Jorioz  
France  
Tél. : 04 50 88 64 00  
Fax : 04 50 68 91 52  
www.ivoclarvivadent.fr

ivoclar  
vivadent<sup>®</sup>  
clinical