


Skyce®

Donnez de l'éclat au sourire de vos patients...



Une tendance actuelle

Les patients ont des attentes de plus en plus importantes en termes d'esthétique : des dents parfaitement alignées, un sourire d'une blancheur éclatante... C'est dans cet esprit que s'inscrit le développement des «bijoux dentaires».

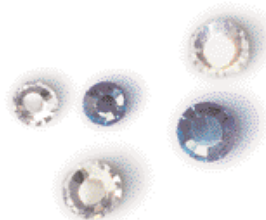

Une réponse professionnelle

Avec Skyce®, Ivoclar Vivadent apporte **une réponse sérieuse, professionnelle et sans risque** à cette demande des patients. Skyce® est un **système complet** qui permet de coller des pierres de cristal sur les incisives centrales ou latérales du bloc supérieur.

Deux tailles, deux couleurs

Skyce® existe en Bleu Saphir ou Cristal, en 1,9 mm ou 2,4 mm de diamètre.

Une technique sans risque

Contrairement à la technique par incrustation, la mise en place de Skyce® **ne nécessite pas de taille de la dent**. Skyce® est collé sur le même principe que les brackets en orthodontie à l'aide du composite **Tetric EvoFlow Bleach I** après mordantage. Le bijou peut être retiré facilement.

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Un protocole simple et sans risque



1- Isolation à l'aide d'une digue.



2- Nettoyage de la surface dentaire avec une pâte prophylactique (**Proxylt®**).



3- Mordançage de la surface où la pierre sera collée (**Total Etch™**, 60 s). Rincer soigneusement. Sécher.



4- Appliquer **Tetric EvoFlow Bleach I** au dos du bijou. Mettre le bijou en place sur la surface dentaire.



5- Photopolymériser les faces mésiale, distale et palatine, 40 s par face.



6- **Skyce®** en place sur la dent.

Une adhésion fiable

Les bijoux Skyce® sont en cristal. Le dos de la pierre est recouvert d'un revêtement dont les **micro-rétentions** permettent d'obtenir une bonne adhésion avec **Tetric EvoFlow Bleach I**

Présentation

- 5 x **Skyce®** Cristal 1,9 mm (réf. 559 321)
- 5 x **Skyce®** Cristal 2,4 mm (réf. 559 322)
- 5 x **Skyce®** Bleu Saphir 1,9 mm (réf. 559 323)
- 5 x **Skyce®** Bleu Saphir 2,4 mm (réf. 559 324)



Refill 1 seringue **Tetric EvoFlow Bleach I** (réf. 595983)



Skyce peut aussi être collé avec l'agent de liaison Heliobond, comme indiqué dans le mode d'emploi. Toutefois, pour un résultat durable, nous recommandons d'utiliser le composite Tetric EvoFlow Bleach I.

Ce matériau a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre selon le mode d'emploi. Les données et illustrations ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. Imprimé en France. Rev.1-juliet 2007.

Filiale France :

Ivoclar Vivadent SAS **clinical**
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz
France
Tél. 04.50.88.64.00
Fax. 04.50.68.91.52
www.ivoclarvivadent.fr

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation