
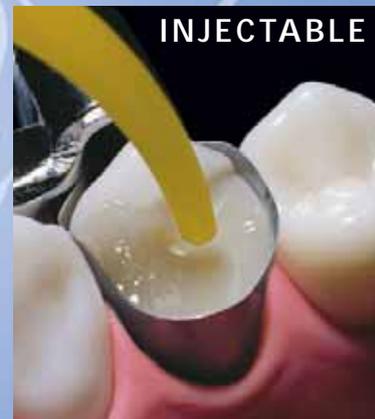


MultiCore®

Deux consistances, trois présentations
A VOUS DE CHOISIR !

compétence en composites

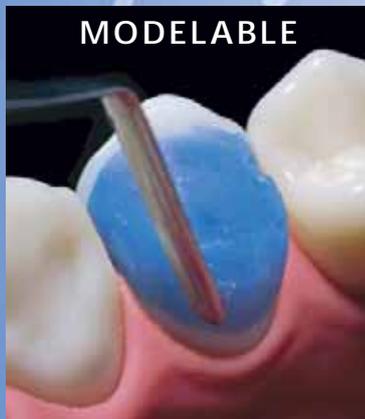

NOUVEAU !
Disponible en seringue
automélangante de 10g

Composite autopolymérisant pour la reconstitution corono-radicaire avec option photopolymérisation

MultiCore®

Une consistance adaptée à chaque technique

Le composite de reconstitution de faux-moignons autopolymérisant MultiCore, pour lequel la photopolymérisation est facultative, vous apporte une grande flexibilité dans votre cabinet.

2 consistances, 2 techniques, 2 méthodes de polymérisation et 4 teintes permettent de créer de bonnes bases pour la reconstruction des dents vivantes ou dévitalisées, dont tout ou partie de la couronne manque.

Technique du modelage

MultiCore HB Haute viscosité



MultiCore HB convient parfaitement aux chirurgiens-dentistes qui préfèrent utiliser la technique du modelage pour la confection de faux-moignons individuels en composite. Grâce à sa bonne tenue, ce matériau à haute viscosité est idéal pour la reconstitution de faux-moignons.

Technique de matrice

MultiCore Flow Basse viscosité



Pour les professionnels qui préfèrent l'utilisation de matrices pour la reconstitution du moignon, MultiCore Flow est idéal grâce à sa consistance fluide.

MultiCore Flow peut aussi être utilisé pour le collage des tenons endodontiques en composite renforcé aux fibres de verre, tels que FRC Postec Plus.



Le matériau ne colle pas

Le matériau se mélange, s'applique et se modèle facilement à l'aide des instruments appropriés. Comme il ne colle pas à la spatule, il est facile de le modeler dans la forme désirée.



Embouts de mélange pratiques

Le système de cartouche, proposé avec embouts d'automélange et embouts intra-oraux, assure un mélange rapide du matériau et permet une application précise. MultiCore s'adapte parfaitement aux surfaces dentinaires prétraitées avec un agent adhésif, et crée une adhésion solide aux tissus dentaires durs restants.

Basé sur des années d'expérience

Notre expérience à long terme en matière de technologie de composites se reflète dans des produits à succès tels que le Tetric.

MultiCore a été développé selon ce savoir-faire, présentant ainsi des propriétés physiques remarquables.


* Marques non déposées par Ivoclar Vivadent



MultiCore®

Une option adaptée à chaque cas


Auto- ou photopolymérisable

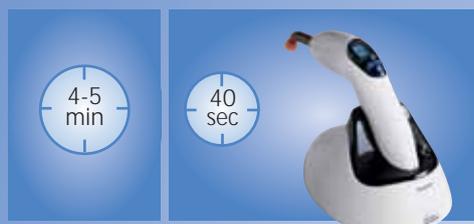

MultiCore est un composite autopolymérisant (temps total de polymérisation : 4-5 minutes) vous permettant de contrôler activement le processus de polymérisation, puisqu'il peut aussi, de façon facultative, être photopolymérisé (40 secondes par face).

Par conséquent, le matériau peut être monté en une seule couche. Il ne vous reste plus qu'à choisir de réduire le temps de polymérisation ou non.

Quatre teintes

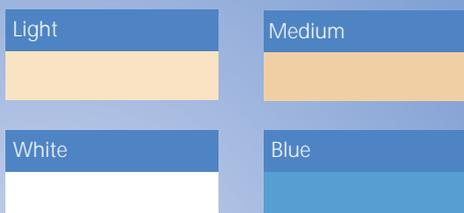

La gamme MultiCore est disponible dans les teintes Light, Medium, White et Blue.

Ces teintes vous permettent de créer une base solide pour tous les types de restaurations prothétiques - qu'il s'agisse de couronnes en métal, céramo-métal ou tout-céramique.

L'adhésif adéquat

Utilisé en combinaison avec l'adhésif automordançant AdheSE, ou AdheSE DC, le système MultiCore vous permet d'obtenir de bons résultats reproductibles de restauration.



Néanmoins, vous pouvez également utiliser les adhésifs éprouvés Syntac ou Excite.

Succès cliniques documentés

Reconstitution de faux-moignon avec MultiCore HB



Application d'AdheSE



Modelage de MultiCore HB



Reconstitution terminée

Reconstitution de faux-moignon avec MultiCore Flow



Application d'AdheSE



Injection de MultiCore Flow



Reconstitution terminée

MultiCore®

Composite de reconstitution en 2 consistances

Présentation

Cartouches

Intro Pack MultiCore Flow

1 cartouche MultiCore Flow de 50 g
1 pistolet manuel, 25 ml, 1:1
1 flacon AdheSE Primer de 2,5 g
1 flacon AdheSE Bonding de 2,5 g
1 AdheSE pad
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue



Double-seringue automélangente

Refill MultiCore Flow, 10g

1 double-seringue automélangente
MultiCore Flow, 10g
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et White

NOUVEAU



Seringues

Intro Pack MultiCore HB

2 seringues MultiCore HB Base de 4 g chacune
2 seringues MultiCore HB Catalyseur de 4 g chacune
1 Bloc de mélange
5 spatules de mélange
1 flacon AdheSE Primer de 2,5 g
1 flacon AdheSE Bonding de 2,5 g
1 AdheSE pad, Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue



Refill cartouche MultiCore Flow

1 cartouche MultiCore Flow de 50 g
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue

Refill Pistolet Manuel

1 Pistolet manuel, 25 ml, 1:1

Refill Embouts de mélange

50 Embouts de mélange

Refill Embouts Intra-Oraux

50 Embouts intra-oraux

Refill Embouts de mélange, petits

10 Embouts de mélange pour
seringue automélangente

Refill Embouts Intra-Oraux, petits

10 Embouts intra-oraux pour
seringue automélangente

Refill seringues MultiCore HB

2 seringues MultiCore HB Base de 4 g chacune
2 seringues MultiCore HB Catalyseur de 4 g chacune
1 Bloc de mélange
5 spatules de mélange
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue