

La révélation par l'empreinte

Maintenant au format

XXL



Hydrophile :
exactement là où c'est
nécessaire

Virtual® 380

Matériau hydrophile pour empreintes de précision

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Conditionnement XX-tra large : Virtual® 380 en cartouches XXL

X-trêmement pratique :



Insérer la cartouche Virtual 380 dans l'appareil de mélange.



Expulser une petite quantité de matériau avant de placer l'embout de mélange pour vérifier que les 2 composants s'écoulent de manière régulière.



Fixer l'embout de mélange.



Placer la bague de serrage et la bloquer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Virtual est un matériau hydrophile pour empreintes de précision aux polyvinylsiloxanes (silicones par addition).

Les consistances Virtual 380, Heavy Body et Monophase, sont désormais conditionnées en cartouches de 380 ml, pour être utilisées dans les mélangeurs Pentamix*, Plug&Press Dispenser* ou MixStar*.

* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG

Ces deux consistances restent disponibles en cartouches de 50 ml utilisables avec le pistolet.

Virtual 380 Heavy Body



Grâce à sa consistance stable et à sa dureté finale élevée, le matériau Virtual 380 Heavy Body haute viscosité est un matériau "Tray" idéal lorsqu'il est utilisé avec le matériau Virtual Light Body en technique de double mélange.

Virtual 380 Heavy Body existe en deux temps de travail et de prise :

	Temps de travail	Temps de prise en bouche
Fast Set :	1:15 min.	2:30 min.
Regular Set :	2:05 min.	4:30 min.

Virtual 380 Monophase



L'élasticité exceptionnelle et la dureté finale élevée de Virtual 380 Monophase, de viscosité moyenne, en font un matériau parfaitement adapté aux empreintes implantaire et empreintes fonctionnelles. Grâce à son exceptionnel comportement thixotropique, le matériau crée suffisamment de pression et, en même temps, s'adapte parfaitement aux tenons de transfert.

Virtual 380 Monophase existe dans le temps de travail et de prise suivant :

	Temps de travail	Temps de prise en bouche
Fast Set :	1:15 min.	3:30 min.

X-ceptionnellement avantageuse :

- toujours prête à l'emploi
- pas d'activation séparée
- mélange plus homogène
- présentation économique
- expulsion rapide du matériau mélangé

Les descriptions et les données fournies ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant.

Imprimé en France - Kalistene - Mai 2006

© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein 600690/0306/e/BVD

Présentations :

Virtual 380 Heavy Body

Refill Fast Set

- 2 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 15 Embouts de mélange
- 2 Bagues de serrage

Refill Regular Set

- 2 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 15 Embouts de mélange
- 2 Bagues de serrage

Multi Pack Fast Set

- 6 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 45 Embouts de mélange
- 6 Bagues de serrage

Multi Pack Regular Set

- 6 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 45 Embouts de mélange
- 6 Bagues de serrage

Virtual 380 Monophase

Refill Fast Set

- 2 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 15 Embouts de mélange
- 2 Bagues de serrage

Multi Pack Fast Set

- 6 Cartouches base et catalyseur, 380 ml chacune
- 45 Embouts de mélange
- 6 Bagues de serrage

Virtual 380 Accessoires

- Refill Anneau de fermeture
- 2 Bagues de serrage

Refill Embout de mélange

- 50 Embouts de mélange



Ivoclar Vivadent SAS Clinical

BP 118

74410 Saint-Jorioz

Tél. : 04 50 88 64 00

Fax : 04 50 68 91 52

www.ivoclarvivadent.fr



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation