

## A quoi peuvent-être dûes les colorations dentaires ?

Certaines catégories d'aliments, de boissons, de médicaments, de pathologies ainsi que le tabac peuvent entraîner des colorations dentaires disgracieuses.

De même, avec l'âge, la teinte des dents s'assombrit.

## Eclaircissement dentaire professionnel – Comment ça marche ?


Un agent de blanchiment contenu dans VivaStyle est appliqué sur les dents. VivaStyle libère de l'oxygène qui éclaircit délicatement les dents dyschromiées. Selon le résultat escompté, le traitement dure généralement une à deux semaines et nécessite une heure par application.

Après un examen complet, le dentiste prend une empreinte de vos dents afin de confectionner une gouttière sur mesure qui sera, par la suite, chargée de gel d'éclaircissement. La première application du produit est réalisée au cabinet dentaire, par le dentiste. Ensuite, ce dernier vous donne les consignes et le produit pour une utilisation à domicile.

## Etapes d'application



Gouttière chargée de gel VivaStyle

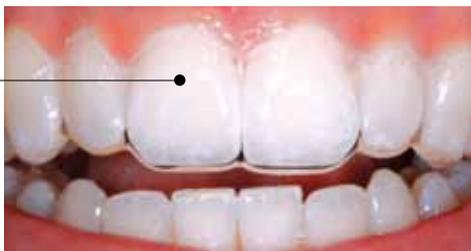

### Y'a-t-il des effets indésirables ? Si oui, comment les éviter ou du moins les réduire ?



Pendant le traitement, la sensibilité de vos dents peut augmenter et il est possible de rencontrer une irritation des gencives. Ces effets disparaîtront à la fin du traitement.



Afin de réduire les effets, il convient d'éviter les boissons et les aliments acides ou chromogènes ainsi que le tabac.



### L'éclaircissement est-il sûr ?

Selon les données scientifiques actuelles, l'éclaircissement dentaire est considéré comme un traitement doux, qui n'affecte pas les dents ni les tissus mous ou les restaurations existantes.



Situation initiale



Situation après éclaircissement dentaire



Cas clinique : Dr David HAKMOUD

Coordonnées de votre praticien

Produits cosmétiques. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.  
AD0214 - RCS Annecy B 326 420 544. Sous réserve d'erreurs typographiques.  
Visuels non contractuels. Imprimé en France

**Ivoclar Vivadent SAS**  
BP 118  
F-74410 Saint-Jorioz Cedex  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +33 (0)4 50 88 64 00  
Fax +33 (0)4 50 68 91 52  
[www.ivoclarvivadent.fr](http://www.ivoclarvivadent.fr)

**ivoclar  
vivadent**  
passion vision innovation

**VivaStyle® 10% | 16%**

Comment préférez-vous sourire ?

Comme ceci ...

...ou comme cela ?



pour un sourire  
étincelant