

SR Vivodent® S PE | S DCL

Des dents d'une esthétique exceptionnelle, adaptées aux exigences les plus raffinées






Carte de formes

- SR Vivodent® S PE
- SR Orthotyp® S PE
- SR Vivodent® S DCL
- SR Orthotyp® S DCL



PETITES

SR Vivodent® S PE | SR Vivodent® S DCL

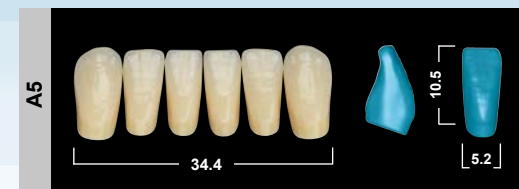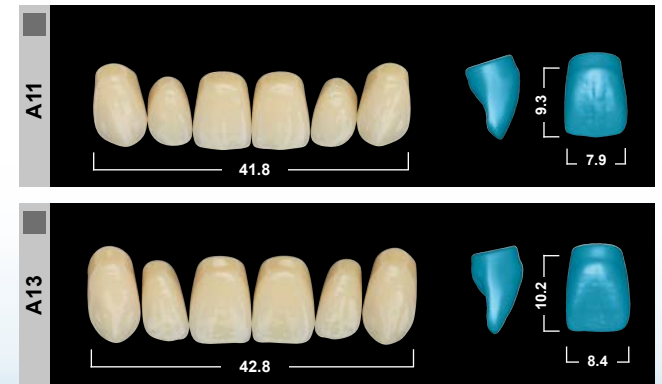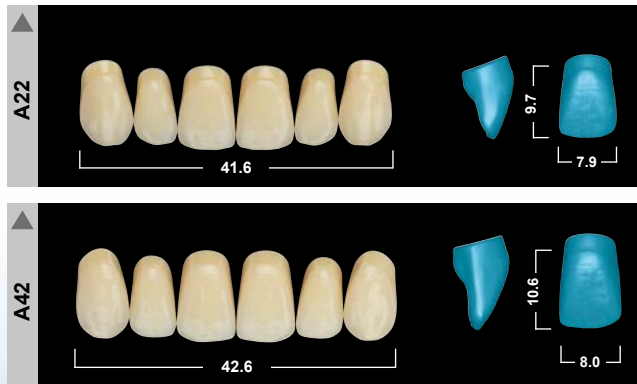


SR Orthotyp® S PE | SR Orthotyp® S DCL



MOYENNES

SR Vivodent® S PE | SR Vivodent® S DCL

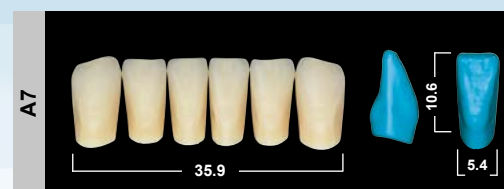


SR Orthotyp® S PE | SR Orthotyp® S DCL



GRANDES

SR Vivodent® S PE | SR Vivodent® S DCL

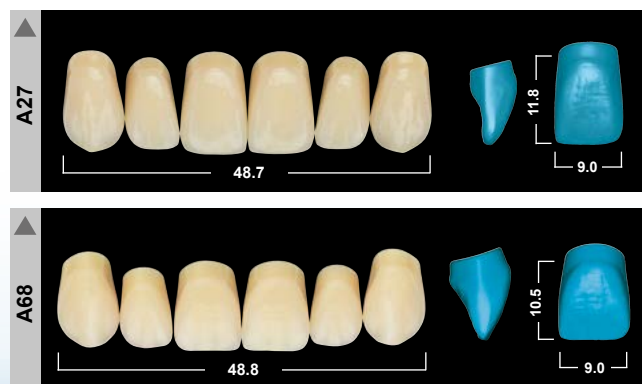

SR Orthotyp® S PE | SR Orthotyp® S DCL



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Teintes

- **SR Vivodent® S DCL** : 16 teintes A–D + 4 teintes Bleach
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
BL1, BL2, BL3, BL4
- **SR Vivodent® S PE** : 20 teintes S PE
01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C,
6D, 4C, 3C, 4D



Choix de la teinte

La teinte est déterminée à l'aide de teintier basé sur le **système de teintes A-D pour les S DCL ou S PE Ivoclar Vivadent**. Les piges du teintier SR Vivodent S DCL et SR Vivodent S PE présentent la même structure et sont constituées du même matériau que les dents de cette gamme. Les différences de teinte sont ainsi réduites au minimum. La prise de teinte sur le patient doit être effectuée dans des conditions de lumière précises (5 500 K température de couleur) ou à la lumière du jour (lumière venant du nord de préférence).

Dents antérieures

Choix des dents antérieures

Dans la mesure du possible, les dents antérieures doivent être choisies en présence du patient, en fonction des caractéristiques anatomiques et esthétiques. Les dents antérieures sont classées en formes triangulaires, ovales et carrées. Chaque forme possède ses propres caractéristiques.

Formes triangulaires

Dans ce groupe les couronnes présentent un bord cervical étroit. La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est modérée.

Formes ovales

Les rayons de courbure sont plus prononcés pour les dents de cette catégorie, et la courbe vestibulaire est particulièrement prononcée.

Formes carrées

Ces formes sont angulées et les incisives centrales sont prédominantes. La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est modérée.

Au cabinet dentaire

L'alamètre permet un choix rapide et ciblé de la taille la plus appropriée des dents antérieures.

Étape 1 : Mesurez la distance interalaire (distance séparant les ailes du nez) à l'aide de l'alamètre et choisissez la taille de dents (petite, moyenne, grande) correspondante.

Étape 2 : Dans cette gamme, choisissez la forme triangulaire, ovale ou carrée.

Le papillomètre est l'outil idéal pour définir la longueur de la lèvre supérieure et la ligne du sourire.

Ces informations importantes permettront le positionnement correct des dents antérieures lors du montage.

Au laboratoire

Les points de référence suivants sont déterminés à l'aide de l'analyse du modèle :

- Position des canines
Repérer les deux premières papilles palatines ; le milieu de la surface vestibulaire des canines maxillaires doit se situer à environ 9 mm de leur extrémité.
- Position des incisives centrales
La face vestibulaire des incisives centrales sera située à environ 7 mm du centre de la papille rétro-incisive.

La longueur de l'arc mesurée entre ces trois points peut servir de référence pour choisir sur la carte de formes le set de dents antérieures d'une largeur adaptée.

Dents postérieures

La carte de formes indique les correspondances de formes des dents postérieures avec les dents antérieures préalablement sélectionnées. Ivoclar Vivadent propose plusieurs types de dents postérieures permettant au praticien de choisir les dents correspondant le mieux aux besoins fonctionnels et esthétiques du patient.

Concept occlusal

SR Orthotyp S DCL et SR Orthotyp S PE sont des choix classiques pour une utilisation en prothèse partielle, hybride et implanto-portée. Les dents Orthotyp sont adaptées à la technique de montage conventionnelle en relation "une dent / deux dents". Dans ce type de montage, les contacts primaires en relation centrée sont situés au niveau des cuspidés palatines au maxillaire et des fosses centrales des postérieures mandibulaires.

Occlusion classique



Montage "une dent/deux dents"



Épaisseur minimale

Afin de conserver la solidité des dents et l'effet de teinte approprié, il est recommandé de respecter les épaisseurs minimales conseillées.

- **Dents antérieures** : min. 2,5 mm
- **Dents postérieures** : **sillon central min. 2,0 mm, pointes cuspidiennes min. 2,5 mm, zone cervicale min. 2,5 mm.**

Afin de garantir la fonctionnalité à long terme des prothèses amovibles, il convient de respecter les principes suivants :

- Les prothèses doivent être conçues et réalisées en étroite collaboration avec le praticien.
- Le chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire doivent assurer une occlusion et une articulation équilibrées.
- Tous les produits dentaires doivent être utilisés en respectant leur mode d'emploi. Les dents prothétiques, notamment, ne doivent pas être affaiblies par un meulage excessif.
- Afin de garantir une adhésion durable avec la résine de base, les dents seront nettoyées au jet de vapeur, dépolies et humidifiées avec du monomère. Lors de l'achèvement de la prothèse avec une résine autopolymérisante, il est également conseillé de créer des rétentions mécaniques.
- L'application de vernis de surface ou de spray nettoyant est déconseillée.
- Les dents ne doivent pas entrer en contact avec une flamme ou une source de chaleur directe.
- Éviter le développement de chaleur consécutif à une trop grande pression lors du grattage.
- Nous recommandons de porter un masque et d'utiliser un système d'aspiration pour se protéger des poussières de grattage.
- Nettoyer avec des agents de nettoyage du commerce. Éviter le contact avec les solvants.
- En cas d'allergie connue à l'un des composants du produit, ne pas utiliser ces dents prothétiques.
- Lors de l'utilisation de revêtements C&B, il convient de respecter le mode d'emploi correspondant.
- Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux des éclats.

TABLEAU DE COMBINAISONS

	SR Vivodent® S PE S DCL Restaurations antérieures		SR Orthotyp® S PE S DCL (22°) Restaurations postérieures
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire/Mandibulaire
PETITES	▲	A22 A42	A3, A4, A5 A3, A4, A5
	●	A44	A3, A4, A5
	■	A11 A13	A3, A4, A5 A3, A4, A5, A6
	▲	A25 A26	A6, A7, A8 A7, A8
MOYENNES	●	A54	A7, A8
	■	A12 A24B A66	A6, A7, A8 A6, A7, A8 A6, A7, A8
	▲	A27 A68	A9, A10 A9, A10
	●	A14	A8, A9
GRANDES	■	A15 A17	A10 A9, A10
			N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L


Ce tableau de combinaison est recommandé à titre indicatif. En cas de conditions anatomiques particulières, des écarts sont possibles.

SR Vivodent et SR Orthotyp sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

CE 0123

EN ISO 22112:2006 (D)
Les descriptions et données fournies ne constituent ni des garanties ni des engagements.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
B1018 - RCS Annecy B 326 420 544 - Imprimé en France

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
74410 Saint Jorioz Cedex
France
Tél. : 04 50 88 64 00
Fax : 04 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

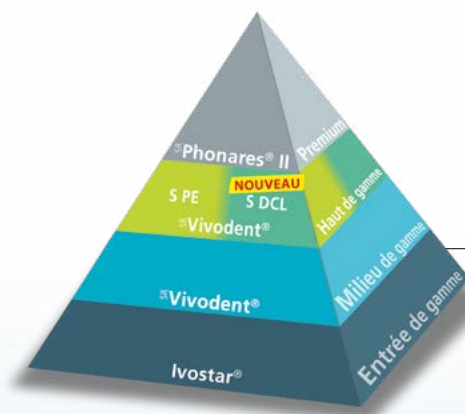

La gamme de dents Ivoclar Vivadent

Une dent spéciale pour chaque sourire

Pour connaître les dernières actualités de notre centre de stages à Annecy (Saint-Jorioz 74)

Retrouvez notre catalogue en ligne sur la page d'accueil www.ivoclarvivadent.fr

UN OUTIL INDISPENSABLE



FORMATIONS CHIRURGIENS-DENTISTES
FORMATIONS PROTHESISTES DENTAIRES
CONFERENCES

Bienvenue au Centre de Stages

JE CHERCHE UNE FORMATION POUR

PROTHESISTE
DENTAIRE

CHIRURGIEN
DENTISTE

ivoclar vivadent®
passion vision innovation