

Indications et combinaisons

	Composite de collage esthétique Variolink® Esthetic*		Composite de collage universel Multilink® Automix*	Composite de collage auto-adhésif SpeedCEM® Plus*
Version	LC	DC	Dual	Dual
Mode de polymérisation	Photopolymérisable	Dual (Auto et photopolymérisable)	(Autopolymérisant avec option photopolymérisable)	(Autopolymérisant avec option photopolymérisable)
Méthode de collage	Sans pouvoir adhésif	Sans pouvoir adhésif	Sans pouvoir adhésif	Auto-adhésive
Adhésif à associer	ex. Adhese® Universal* ou Syntac®*	ex. Adhese Universal ou Syntac	Multilink Primer A/B*	—
Métal / Base métal				
Inlays/Onlays/Couronnes partielles	—	—	✓	✓
Couronnes/Bridges	—	—	✓	✓
Tenons endodontiques	—	—	✓	✓
Bridges Maryland	—	—	✓	—
Vitrocéramique, ex. IPS Empress®				
Inlays/Onlays/Couronnes partielles	✓	✓	✓	—
Facettes	✓	✓	—	—
Couronnes	—	✓	✓	—
Disilicate de Lithium (LS₂) ex. IPS e.max®				
Facettes occlusales	✓	✓	—	—
Facettes pelliculaires/Facettes	✓	✓	—	—
Inlays/Onlays/Couronnes partielles	✓	✓	✓	—
Couronnes	—	✓	✓	✓
Bridges 3 éléments	—	✓	✓	✓
Céramiques oxydes (Zircone/Alumine) ex. Zenostar®, IPS e.max ZirCAD®				
Couronnes/Bridges	—	—	✓	✓
Tenons endodontiques	—	—	✓	✓
Composites indirects ex. SR Nexco®				
Inlays/Onlays	✓	✓	✓	—
Couronnes	—	✓	✓	—
Tenons endodontiques	—	—	✓	✓

✓ Combinaison du produit recommandée
 — Non recommandé

*Dispositif médical Classe IIa/CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement la notice.
 Produits non remboursés par les organismes de santé.

CEMENTATION NAVIGATION SYSTEM



Trouvez votre chemin dans le labyrinthe du collage

Cette application multimédia vous aidera à faire le bon choix pour chaque indication.

Sur pilier naturel ou implantaire, chaque cas est illustré par des animations qui vous permettront d'obtenir le collage idéal.



Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 64 00
Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr



www.cementation-navigation.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation