

SR Vivodent® | SR Orthotyp®

Une apparence naturelle conjuguée à d'excellentes propriétés mécaniques

Carte de formes


SR Vivodent®
SR Orthotyp®



DENTS ANTÉRIEURES

SR Vivodent®


DOUCES (SOFT)

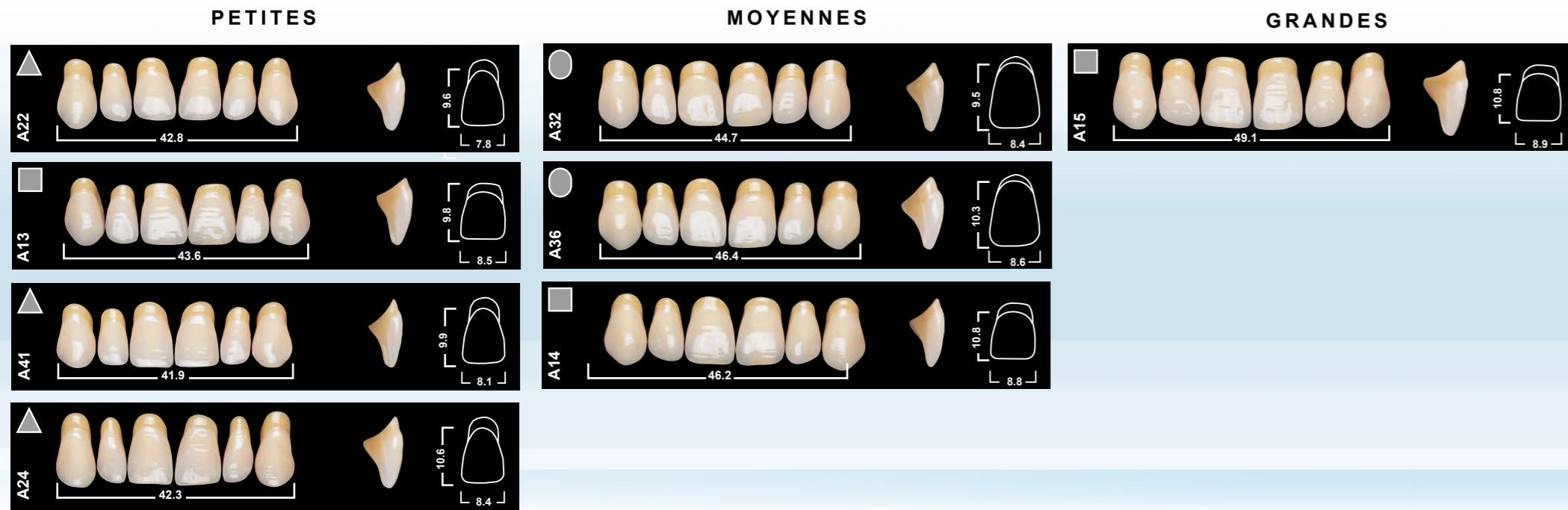

DENTS ANTÉRIEURES


SR Vivodent®

MARQUÉES (BOLD)

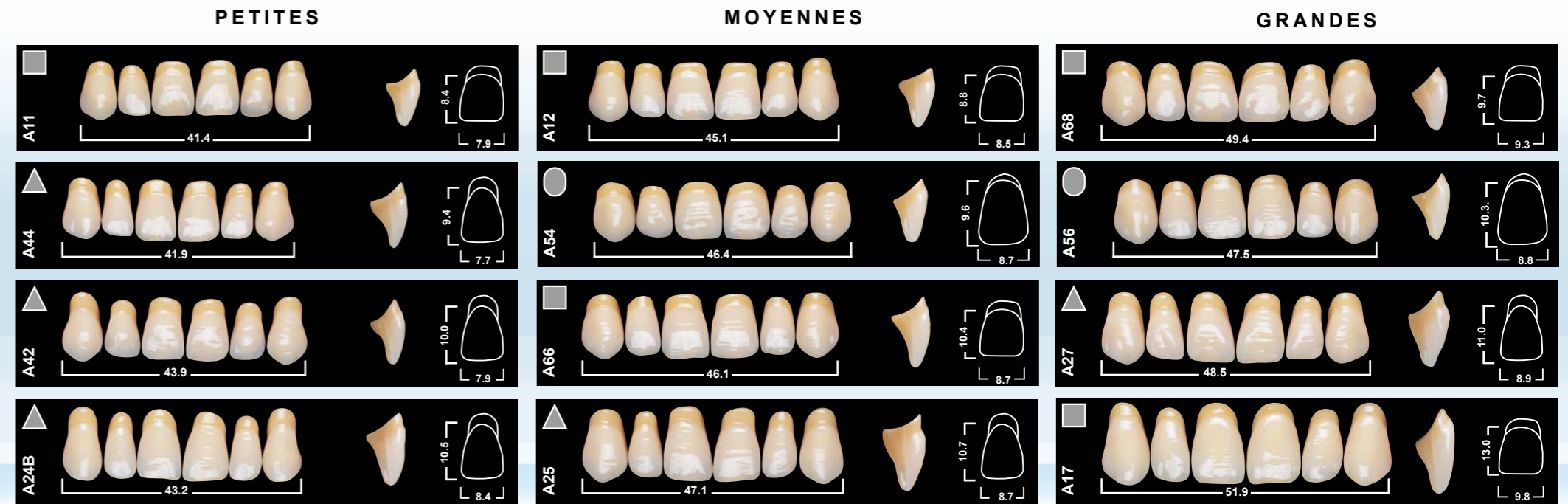


DENTS ANTÉRIEURES

SR Vivodent®

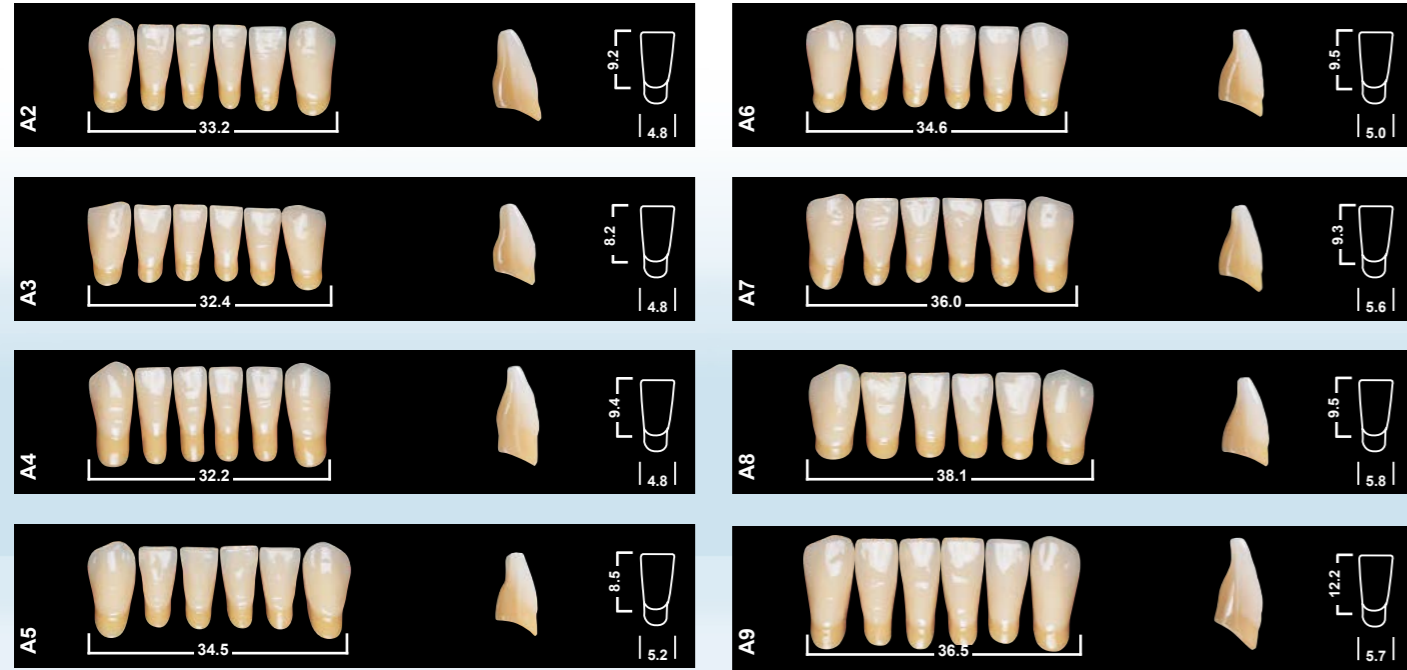

DENTS POSTÉRIEURES

SR Orthotyp®

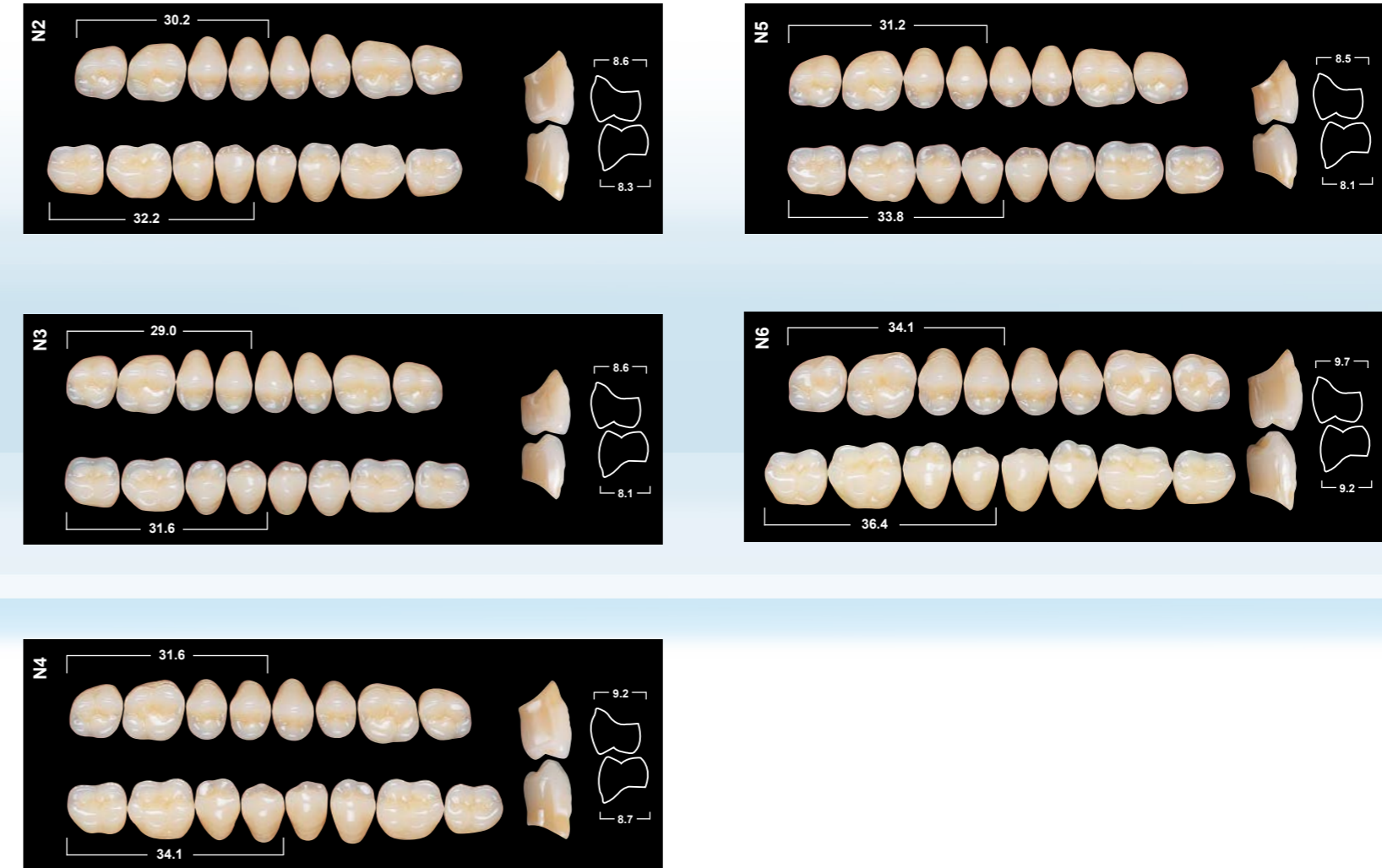

CRITÈRES DE SÉLECTION

Antérieures

Les dents antérieures Ivoclar Vivadent sont classées par formes : carrées, triangulaires et ovales.

Bien qu'il s'agisse d'une classification générale, chaque forme possède ses propres caractéristiques.

Stratification des dents antérieures



Stratification en 3 couches



Formes carrées

Ces formes sont angulées et les incisives centrales sont prédominantes. La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est modérée. La forme de l'arcade est nettement carrée et correspond généralement à une articulation normale.



Formes triangulaires

Dans ce groupe, les couronnes présentent un bord cervical étroit. La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est moyennement prononcée. La forme de l'arcade est également triangulaire, indiquant parfois un articulé inversé.



Formes ovales

La courbure vestibulaire dans le plan sagittal est plus prononcée pour les dents de cette catégorie. La forme de l'arcade, ovale, indique souvent une articulation basse.

Postérieures

Le tableau de combinaisons indique les correspondances de formes des dents postérieures avec les dents antérieures préalablement sélectionnées.

Ivoclar Vivadent propose plusieurs types de dents postérieures permettant de choisir les dents correspondant le mieux aux besoins fonctionnels et esthétiques du patient.



Forme de type N pour un mordu normal

Avec les types de mordus normaux (Classe I d'Angle), la ligne intervestibulaire de la courbe du profil antérieur est perpendiculaire au plan d'occlusion. Pour ces patients, des formes de type N doivent être utilisées. Elles sont disponibles en cinq tailles différentes.

TABLEAU DE COMBINAISONS

	SR Vivodent® Restaurations antérieures		SR Orthotyp® Restaurations postérieures
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire/Mandibulaire
■	A 11	A 3	N 3
	A 12	A 5	N 3
	A 13	A 5	N 3 / N 5
	A 14	A 6 / A 7	N 5
	A 15	A 8	N 4
	A 17	A 9	N 6
	A 66	A 5 / A 7	N 5
	A 68	A 7	N 4 / N 5
▲	A 22	A 3	N 3 / N 5
	A 24	A 2	N 2
	A 24 B	A 4 / A 5	N 2
	A 25	A 9	N 4
	A 27	A 8	N 4
	A 41	A 3 / A 5	N 3 / N 5
	A 42	A 5	N 3 / N 5
	A 44	A 3	N 3 / N 5
●	A 32	A 3 / A 5	N 3 / N 5
	A 36	A 7	N 5
	A 54	A 5	N 5
	A 56	A 7 / A 8	N 5

Ce tableau de combinaison est recommandé à titre indicatif. En cas de conditions anatomiques particulières, des écarts sont possibles.

SR Vivodent® | SR Orthotyp®

Une apparence naturelle conjuguée
à d'excellentes propriétés mécaniques


Choix de la teinte

Avec le teintier Chromascop

Le teintier Chromascop permet de choisir la teinte des dents et des matériaux de stratification en résine, composite ou céramique pour les prothèses combinées, au sein de ce système de teintes.

Teintes

– 20 Chromascop

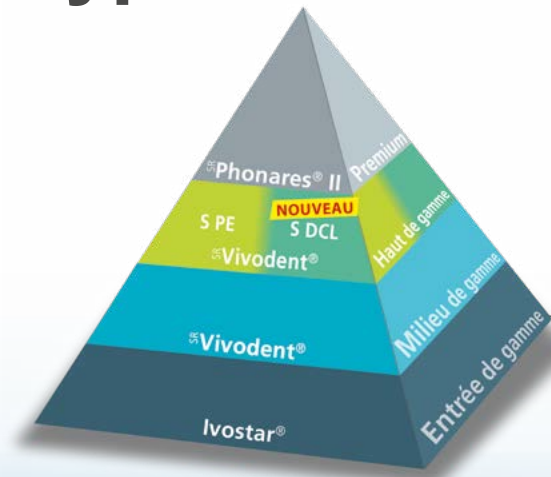

La gamme de dents Ivoclar Vivadent

Une dent spéciale pour chaque sourire

Pour connaître les dernières actualités
de notre centre de stages à Ancey
(Saint-Jorioz 74)

Retrouvez notre catalogue en ligne
sur la page d'accueil www.ivoclarvivadent.fr

UN OUTIL INDISPENSABLE



FORMATIONS CHIRURGIENS-DENTISTES
FORMATIONS PROTHÉSISTES DENTAIRES
CONFÉRENCES

**Bienvenue
au Centre de Stages**

JE CHERCHE UNE FORMATION POUR

PROTHÉSISTE
DENTAIRE

CHIRURGIEN
DENTISTE

SR Vivodent et SR Orthotyp sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

CE 0123

Les descriptions et données fournies ne constituent
ni des garanties ni des engagements.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
B1018 - RCS Ancey B 326 420 544 - Imprimé en France

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
74410 Saint Jorioz Cedex
France
Tél. : 04 50 88 64 00
Fax : 04 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation