

# IPS e.max® ZirCAD MT BL/LT 0

All ceramic,  
all you need.

## Infiltration BASIQUE avec IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

- 25  IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids (A–D)  
+  
1  IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator rouge



1

1x avec pinceau N° 5



2

1x avec pinceau N° 5



3



1x avec pinceau N° 5

4



1x avec pinceau N° 5

5



1x avec pinceau N° 5

6

Temps de séchage  
avant  
l'infiltration avancée



## Infiltration AVANCÉE avec IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquids A–D

### Recommandations

pour personnaliser les teintes Effect avec IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator :

**25**  IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquid gris, violet

+

**1**  IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator jaune



**25**  IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquid orange

+

**1**  IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator bleu



**25**  IPS e.max® ZirCAD MT/LT Colouring Liquid blue

+

**1**  IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Indicator bleu + jaune (= vert)



7



Pour un effet de profondeur naturel, appliquer du gris sur l'incisal et au niveau des lignes de transition

1x avec pinceau N° 1 ou 3

8



Effets de translucidité avec du bleu dans la zone incisale

1x avec pinceau N° 1 ou 3

9



Effet de translucidité avec du violet dans les zones incisale et cervicale

1x avec pinceau N° 1 ou 3

10

Temps de séchage avant frittage

