

Reproduire les teintes Chromascop IPS Style® avec les teintes A-D

Comme annoncé dans le Business Plan 2019, les teintes Chromascop de IPS InLine, IPS d.SIGN et IPS Classic, disparaîtront à la fin de cette année.

Le tableau de combinaison ci-dessous a été conçu pour faciliter le changement aux clients utilisateurs. Il indique dans quelle proportion les masses IPS Style en teinte A-D doivent être mélangées pour reproduire fidèlement les teintes Chromascop (résultat correspondant au teintier Chromascop).

Ces données sont valables uniquement pour la gamme IPS Style (pas pour IPS InLine, IPS d.SIGN ou IPS Classic) et peuvent être ajustées au cas par cas par l'utilisateur.

Tableau de combinaison IPS Style® en teintes A-D / Chromascop

Desired Chromascop shade	Materials required IPS Style®				IPS Style® Ceram Incisal	
	IPS Style® Ceram Powder Opaquer	Mixing ratio for the dentin layer				
110	Bl3 Bl4	3/4 D A1	1/4 D A2		1 1	
120	Bl3 Bl4	1/3 D A1	2/3 D A2		1 1	
130	A1	1/3 D A1	2/3 D A2		1 1	
140	A1	D A2			1 1	
210	B2	2/3 D A3	1/3 D B3		1 2	
220	A2	1/2 D A2	1/2 D A3.5		1 2	
230	B2	6/20 D A3	13/20 D B3	1/20 Basic Gingiva BG 34	1 2	
240	B4	2/17 D A1	6/17 D A3.5	8/17 D B4	1/17 Basic Gingiva BG 34	1 2
310	B3	1/4 D B3	3/4 D D4		1 2	
320	B4	1/4 D A4	1/4 D B4	2/4 D D4	1 3	
330	B4	1/10 D A4	8/10 D B4	1/10 Mamelon yellow-orange	1 2	
340	B4	3/10 D A4	3/10 D B4	2/10 D D4	2/10 Mamelon yellow-orange	1 2
410	D3	1/3 D D2	2/3 D D3		1 2	
420	B3	1/3 D D2	2/3 D D3		1 2	
430	C2	1/4 D C1	2/4 D C2	1/4 D D4	1 3	
440	C1	1/4 D C1	2/4 D C2	1/4 D D4	1 3	
510	C2	6/15 D A3	1/15 D B3	6/15 D C3	2/15 CT khaki	1 3
520	C3	1/2 D C4	1/2 D D4		1 2	
530	C3	2/6 D B4	1/6 D C3	1/6 Mamelon yellow-orange	2/6 CT khaki	1 2
540	C4	3/10 D A4	2/10 D C3	1/10 Mamelon yellow-orange	3/10 CT khaki 1/10 Basic Gingiva BG 34	1 2

Note : Ce tableau de combinaison est donné à titre indicatif seulement, et peut être adapté en fonction des cas.